

Alere Technologies AC

U-ALBUMIN CONTROL
Набор контролей альбумина в моче
для in vitro диагностики
1116089
РУ ФСЗ 2009/05295 от 24 июня 2015

НАЗНАЧЕНИЕ

Данный набор контролей состоит из 2 контрольных материалов на основе человеческой мочи и предназначен для проверки работы тест-системы Nycocard U-Albumin.

РЕАГЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ НАБОРА

C+ - Положительный контроль 1 x 1,0 мл

Жидкая человеческая моча с азидом натрия (<0,1%)

C- - Отрицательный контроль 1 x 1,0 мл

Жидкая человеческая моча с азидом натрия (<0,1%)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Для использования *in vitro*
- Контроль изготовлен из материалов человеческого происхождения, показавших отрицательные результаты при тестировании на HBsAg, антитела к гепатиту С и ВИЧ, тем не менее с ним следует обращаться как с потенциально инфицированным.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ РЕАГЕНТОВ

Запечатанную оригинальную упаковку набора хранить при температуре 2-8°C до истечения срока годности. Не допускать попадания прямого солнечного света и воздействия температур выше 25°C. Не замораживать.

Неоткрытые флаконы с контролями следует хранить при 2-8°C. Контроль может быть однократно заморожен до -20°C, при этом он стабилен в течение 12 недель

Открытые флаконы стабильны в течение 12 недель при 2-8°C. При признаках микробной контаминации флакон следует выбросить.

ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА

Контроли должны исследоваться так же, как пробы пациентов с использованием тест-системы Nycocard U-Albumin. Предварительной подготовки контрольного материала не требуется. Контроль можно исследовать холодным без приведения его к комнатной температуре. Следуйте инструкции к набору Nycocard U-Albumin.

ОЖИДАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Допустимый диапазон концентрации альбумина указана на этикетке флакона, измеренное значение должно находиться внутри данного интервала. Диапазон значений указан в соответствии с CRM 470 (референсный препарат IFCC/BCR/CAP). Если результат измерения контроля выходит за пределы указанного диапазона, не следует анализировать образцы пациентов до разрешения проблемы (см. раздел Разрешение проблем в инструкции к набору Nycocard U-Albumin.

Информация для заказа

119899, Москва, Ленинские горы, АО "БиоХимМак"
тел. (095) 939-24-21, факс (095) 939-09-97
info@biochemmack.ru